

1. วัตถุประสงค์ในการใช้หรือข้อบ่งใช้

รถเข็นรุ่น H-WC108G-12 Blue ผลิตจากอลูมิเนียม พับเก็บได้ปลอดภัยใช้งานง่าย เหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย รถเข็นได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง เช่น

- เบรกมือ ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถหยุดรถเข็นในเวลาฉุกเฉิน
- ที่วางเท้าแบบพับได้ และแผ่นรองนั่งได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย เป็นต้น

2. เครื่องหมายและสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในคำแนะนำสำหรับการใช้งานเหล่านี้ บนบรรจุภัณฑ์และบนแผ่นประเภทของอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม :



ข้อควรระวัง: คำเตือนที่ระบุถึงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อสุขภาพ




คำเตือน: หมายเหตุเพื่อความปลอดภัยระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเครื่อง / อุปกรณ์เสริม



หมายเหตุ: หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ


3. รายละเอียดเครื่องมือแพทย์

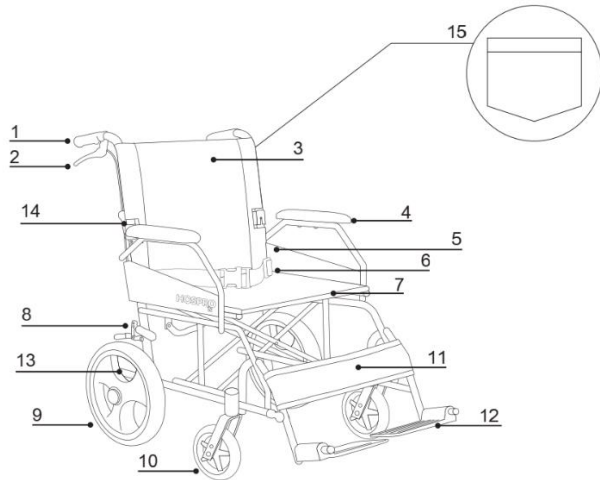


- | | | |
|----------------|------------------|------------------------|
| 1. มือจับ | 6. เข็มขัดนิรภัย | 11. แผ่นรองนั่ง |
| 2. เบรกมือ | 7. ที่นั่ง | 12. ที่วางเท้า |
| 3. พนักพิง | 8. เบรกล้อ | 13. คานยกล้อ |
| 4. พนักแขน | 9. ล้อหลัง | 14. ตัวล็อคพนักพิงหลัง |
| 5. แผงด้านข้าง | 10. ล้อหน้า | 15. ช่องใส่ของด้านหลัง |

4. ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ คำแนะนำการใช้


1. เข็มขัดนิรภัย กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัย

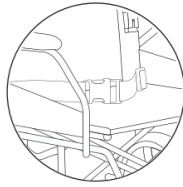


2. ตัวล็อคพนักพิงหลัง คุณสามารถปลดล็อคและพับพนักพิงได้เมื่อคุณไม่ใช้เก้าอี้รถเข็น

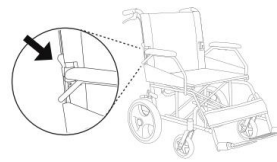

3. ที่วางเท้าสามารถปรับมุมได้ 3 ระดับและพับขึ้นได้

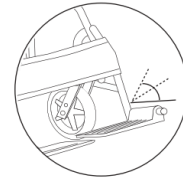


4. เบรกมือสำหรับผู้ดูแล สามารถเบรกล้อให้หยุดได้ในเวลาฉุกเฉิน

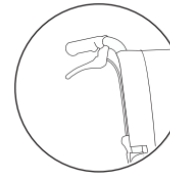

5. คานยกล้อ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลสามารถยกรถเข็นได้ง่ายขึ้น



6. ล้อรถเข็น ล้อใหญ่มีที่ล็อคล้อ เพื่อห้ามไม่ให้รถเข็นลื่นไถล หรือเลื่อนไปมา

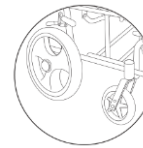

5. วิธีการเก็บรักษา

1. การกางรถเข็น โดยจับที่พนักแขนทั้งสองข้างจากนั้นดันลง



2. การพับล้อเลื่อนควรวางที่วางเท้าของรถเข็นให้อยู่ในแนวตั้ง จับขอบด้านข้างด้านหน้าและหลังของเบาะนั่งแล้วดึงขึ้น คานขวางของเก้าอี้รถเข็นจะพับพร้อมกันเพื่อพับรถเข็น



6. คำเตือน ข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวัง

1. รับน้ำหนักสูงสุด - 100 กก.



2. ความเร็ว: ไม่ควรเร็วกว่า 3-5 กม. / ชม.



3. กรุณาพับที่วางเท้า ก่อนที่จะลุกขึ้นยืน



ควรใช้อย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

7. รายละเอียดทางเทคนิค

ประเภท	รถเข็น
รุ่น	H-WC108G-12 Blue
วัสดุ	โครง: อลูมิเนียม ที่นั่ง: ผ้าตาข่ายระบายอากาศ
สี	ฟ้า
ขนาดพับ	28 x 93 x 88 ซม.
ขนาดที่กางออก	56 x 93 x 88 ซม.
ที่นั่ง	17 นิ้ว: (D) 36 x (W) 44 ซม.
ล้อหน้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง)	6 นิ้ว
ล้อหลัง (เส้นผ่านศูนย์กลาง)	12 นิ้ว
รับน้ำหนักสูงสุด	100 กก.
น้ำหนักเฉพาะรถเข็น	11 กก.
อุปกรณ์เสริม	ผ้าคลุมรถเข็น

บริษัท เบลแมสไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.แก้วโกโล 23 ถ.แก้วโกโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 098-280-5777, 038-314-118

สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 065-503-6565