

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

ที่นอนลม รุ่น โอล่า 418 พีวีซี

(Alternating Pressure Air Flotation Mattress Model OLA 418PVC)

ข้อบ่งชี้และประโยชน์

- ช่วยลดและกระจายแรงกดทับของร่างกาย ซึ่งจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับ

คำเตือน

1. ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
2. อาจทำให้เกิดอาการช็อค/หมดสติ จากการทำงานผิดปกติของเครื่องหรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายจากการรั่วของกระแสไฟฟ้า
3. เก็บแผ่นที่นอนลมให้พ้นมือเด็ก
4. ไม่ควรให้แผ่นที่นอนลมโดยของมีคม

ข้อควรระวัง

1. ควรถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
2. ไม่ควรใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
3. ระวังอย่าให้โดนน้ำ หรือน้ำหกใส่
4. ควรระมัดระวังเมื่อมีการใช้งานกับเด็ก หรือ ใกล้กับเด็ก

ข้อห้ามใช้

1. บริเวณที่มีแผลบาดเจ็บ หรือ แผลเปิด
2. ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการดึงกระดูก
3. ผู้ป่วยที่บาดเจ็บเกี่ยวกับไขสันหลัง
4. ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ

วิธีการใช้งาน

1. อ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้
2. ต่อแผ่นที่นอนลมกับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง (220-230 โวลต์) เท่านั้น
3. ปูแผ่นที่นอนลมบนเตียงนอน โดยเอาส่วนที่เป็นลอนไว้ด้านบนระวังอย่าให้ที่นอนลมผิวด้านมีฉนวนนั้นจะทำให้ไม่มีผลด้านการรักษาผู้ป่วย
4. คลุมที่นอนลมด้วยผ้าปูที่ทำจากผ้าซึ่งระบายอากาศได้ดี โปรดอย่าใช้ผ้าปูที่ทำมาจากวัสดุที่ระบายอากาศได้ไม่ดี เช่น พลาสติกหรือใยสังเคราะห์ซึ่งอาจจะทำให้การรักษาต่อผู้ป่วยทำได้อย่างไม่เต็มที่
5. ต่อสายลมซิลิโคนเข้ากับแผ่นที่นอนลมและเข้ากับท่อลมออกของเครื่องปั๊มลมไฟฟ้าโดยต่อให้แน่นพอดีวางเครื่องปั๊มในแนวราบหรือแขวนไว้แนวตั้งฉาก โดยใช้ขอเกี่ยวหลังเครื่อง
6. ยึดแผ่นที่นอนลมให้ติดกับฟูก โดยสอดบริเวณส่วนหัวและท้ายทั้งสองด้านของแผ่นที่นอนลมซึ่งไม่มีลมเข้าไปได้ฟูกเพื่อป้องกันมิให้แผ่นที่นอนลมเคลื่อนที่
7. ตรวจสอบสายลมซิลิโคนที่เป็นทางเดินลมว่าไม่ได้บิดงอหรือถูกทับจนลมไม่สามารถผ่านได้
8. หมุนปุ่มปรับระดับลมไปทางขวาสุดเพื่อปรับลมเข้าแผ่นที่นอนลมมากที่สุด เสียบไฟ และกดสวิทช์ปิด-เปิดไปยัง ON
9. รอจนลมเข้าที่นอนจนเต็ม วางผู้ป่วยลงนอนบนแผ่นที่นอนลม
10. ปรับระดับความอ่อนแข็งของแผ่นที่นอนลมโดยหมุนปุ่มปรับระดับลมไม่ควรปรับให้อ่อนจนหลังผู้ป่วยสัมผัสกับพื้น
11. รักษาระดับลมโดยการเปิดเครื่องปั๊มลมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

ปุ่มปรับระดับลม อยู่ที่เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า

- หมุนไปทางขวา แผ่นที่นอนลมจะแข็งตัวขึ้น
- หมุนไปทางซ้าย แผ่นที่นอนลมจะอ่อนตัวลง

ปุ่มเปิด-ปิดกระแสไฟฟ้า(ON-OFF) อยู่ที่เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า

- เมื่อกดไปที่ ON เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า จะเริ่มทำงาน
- เมื่อกดไปที่ OFF เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า จะหยุดทำงาน

คำเตือนในการใช้เครื่อง

คำเตือน

1. ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
2. ห้าม ดึง บิด หรือพับสายไฟ
3. ไม่ควรให้แผ่นที่นอนลม โดนของมีคม
4. เก็บแผ่นที่นอนลม ให้พ้นมือเด็ก
5. ห้ามทำความสะอาดโดยการซักหรือซักแห้ง
6. ระหว่างการใช้งาน ห้ามพับ หรือม้วนแผ่นที่นอนลมโดยเด็ดขาด
7. ถ้าแผ่นที่นอนลมหรือเครื่องปั๊มลมไฟฟ้ามีความผิดปกติขณะใช้งาน ให้รีบปิดสวิตช์ และดึงปลั๊กไฟออกทันที

ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

1. ไม่ควรใช้แผ่นที่นอนลม ถ้าสายไฟชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือแช่อยู่ในน้ำ
2. ไม่ควรนั่งหรือยืนบนแผ่นที่นอนลม
3. ไม่ควรเคลื่อนย้ายแผ่นที่นอนลม โดยวิธีดึงหรือลากสายไฟ
4. ไม่ควรแกว่ง ดึง หรือบิดสายไฟของแผ่นที่นอนลมและเครื่องปั๊มลมไฟฟ้า
5. ไม่ควรวางแผ่นที่นอนลมใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ทำให้เกิดความร้อน และไม่ควรให้สายไฟวางอยู่บนพื้นที่ยี่ร้อน
6. ไม่ควรให้ของแหลมคมทิ่มเข้าไปในแผ่นที่นอนลม
7. อย่าใช้อุปกรณ์ในขณะที่แผ่นที่นอนลมย่นหรือถูกพับอยู่
8. อย่าถอดปลั๊กโดยใช้วิธีดึงสายไฟ
9. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังการใช้งาน

10. ตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสายไฟ ว่ามีความเสียหายหรือฉีกขาดหรือไม่ ถ้ามีควรหยุดใช้งาน

การทำความสะอาด

1. ก่อนทำความสะอาด ให้กดปุ่มเปิด-ปิดกระแสไฟฟ้า(ON-OFF) ไปที่ “OFF” แล้วถอดปลั๊กไฟออก
2. ไม่ควรให้เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า แช่อยู่ในน้ำ
3. ทำความสะอาดส่วนเฉพาะด้านนอกของเครื่องปั๊มลมไฟฟ้าเท่านั้น
4. ส่วนที่เป็นพลาสติกถ้ามีคราบสกปรกใดๆ สามารถทำความสะอาดได้โดยใช้สบู่อ่อน และน้ำหรือผ้าแห้งหรือผ้าหมาดๆ เช็ดหลังจากถอดปลั๊กแล้ว ผึ่งลมให้แห้ง
5. ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ กัดกร่อนทำความสะอาดส่วนที่เป็นพลาสติก

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

1. ปั๊มลมไม่ทำงาน
 - ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟ เสียบกับเต้าเสียบแน่นพอดี จากนั้นเปิดสวิตช์เปิด/ปิด อีกครั้งหนึ่ง
 - หากยังเกิดปัญหาอยู่ให้ ติดต่อศูนย์บริการ
2. แผ่นที่นอนลมพองตัวไม่เต็มที่
 - ปรับเพิ่มความดันในชั้นแรกก่อน
 - ตรวจสอบว่า สายลมซิลิโคน ต่อกับแผ่นที่นอนลมอย่างถูกต้อง สายมีการบิดตัวหรือรั่วหรือไม่ หากมีการรั่วให้ติดต่อศูนย์บริการ

การเก็บรักษา

1. เก็บในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวกและพ้นจากแสงแดด
2. เก็บรักษาโดยไม่พับหรือวางของหนักทับ

ผู้นำเข้า บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด

เลขที่ 15/117 หมู่ 3 ซอยเก้ากิโล23 ถนนเก้ากิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา

จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ 098-2805777 หรือศูนย์บริการหลังการขาย 081-633-9942

เบอร์โทรสาร 038-314-118

ผู้ผลิต บริษัท อีอีซีแคร้ เมคคอลล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 3-1 ถนนหมื่นฉวน เมืองฉะเชิงเทรา โทเป เลียน ได้หวัน