

## เอกสารประกอบเครื่องมือแพทย์

### ที่นอนลม รุ่น โอล่า 250

(Alternating Pressure Air Flotation Mattress Model OLA 250)

#### ข้อบ่งชี้และประโยชน์

- ช่วยลดและกระจายแรงกดทับของร่างกาย ซึ่งจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับ

#### คำเตือน

1. ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
2. อาจทำให้เกิดอาการช็อค/หมดสติ จากการทำงานผิดปกติของเครื่องหรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายจากการรั่วของกระแสไฟฟ้า
3. เก็บแผ่นที่นอนลมให้พ้นมือเด็ก
4. ไม่ควรให้แผ่นที่นอนลมโดยของมีคม

#### ข้อควรระวัง

1. ควรถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
2. ไม่ควรใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
3. ระวังอย่าให้โคนน้ำ หรือน้ำหกใส่
4. ควรระมัดระวังเมื่อมีการใช้งานกับเด็ก หรือ ใกล้กับเด็ก

#### ข้อห้ามใช้

1. บริเวณที่มีแผลบาดเจ็บ หรือ แผลเปิด
2. ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการดึงกระดูก
3. ผู้ป่วยที่บาดเจ็บเกี่ยวกับไขสันหลัง
4. ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ

#### วิธีการใช้งาน

1. อ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้
2. ต่อแผ่นที่นอนลมกับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง (220-230 โวลต์) เท่านั้น
3. ปูแผ่นที่นอนลมบนเตียงนอน โดยเอาส่วนที่เป็นลอนไว้ด้านบนระวังอย่าให้ที่นอนลมผิวด้านมีลอนนั้นทำให้ไม่มีผลด้านการรักษาผู้ป่วย
4. กลุ่มที่นอนลมด้วยผ้าปูที่ทำจากสียซึ่งระบายอากาศได้ดี โปรดอย่าใช้ผ้าปูที่ทำมาจากวัสดุที่ระบายอากาศได้ไม่ดี เช่น พลาสติกหรือใยสังเคราะห์ซึ่งอาจจะทำให้การรักษาต่อผู้ป่วยทำได้อย่างไม่เต็มที่
5. ต่อสายลมซิลิโคนเข้ากับแผ่นที่นอนลมและเข้ากับท่อลมออกของเครื่องปั๊มลมไฟฟ้าโดยต่อให้แน่นพอดีวางเครื่องปั๊มในแนวราบหรือแขวนไว้ในแนวตั้งฉากโดยใช้ข้อเกี่ยวหลังเครื่อง
6. ยึดแผ่นที่นอนลมให้ติดกับฟูก โดยสอดบริเวณส่วนหัวและท้ายทั้งสองด้านของแผ่นที่นอนลมซึ่งไม่มีลมเข้าไปใต้ฟูกเพื่อป้องกันมิให้แผ่นที่นอนลมเคลื่อนที่
7. ตรวจสอบสายลมซิลิโคนที่เป็นทางเดินลมว่าไม่ได้บิดงอหรือถูกทับจนลมไม่สามารถผ่านได้
8. หมุนปุ่มปรับระดับลมไปทางขวาสุดเพื่อปรับลมเข้าแผ่นที่นอนลมมากที่สุด เสียบไฟ และกดสวิตช์เปิด-ปิดไปยัง ON
9. รอจนลมเข้าที่นอนจนเต็ม วางผู้ป่วยลงนอนบนแผ่นที่นอนลม
10. ปรับระดับความอ่อนแข็งของแผ่นที่นอนลมโดยหมุนปุ่มปรับระดับลมไม่ควรปรับให้อ่อนจนหลังผู้ป่วยสัมผัสกับพื้น
11. รักษาระดับลมโดยการเปิดเครื่องปั๊มลมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

#### ปุ่มปรับระดับลม อยู่ที่เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า

- หมุนไปทางขวา แผ่นที่นอนลมจะแข็งตัวขึ้น
- หมุนไปทางซ้าย แผ่นที่นอนจะอ่อนตัวลง

#### ปุ่มเปิด-ปิดกระแสไฟฟ้า(ON-OFF) อยู่ที่เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า

- เมื่อกดไปที่ ON เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า จะเริ่มทำงาน
- เมื่อกดไปที่ OFF เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า จะหยุดทำงาน

## คำเตือนในการใช้เครื่อง

### คำเตือน

1. ใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
2. ห้าม ดึง บิด หรือพับสายไฟ
3. ไม่ควรให้แผ่นที่นอนลม โดนของมีคม
4. เก็บแผ่นที่นอนลม ให้พ้นมือเด็ก
5. ห้ามทำความสะอาดโดยการซักหรือซักแห้ง
6. ระหว่างการใช้งาน ห้ามพับ หรือม้วนแผ่นที่นอนลมโดยเด็ดขาด
7. ถ้าแผ่นที่นอนลมหรือเครื่องปั๊มลมไฟฟ้ามีความผิดปกติขณะใช้งาน ให้รีบปิดสวิทช์และดึงปลั๊กไฟออกทันที

## ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

1. ไม่ควรใช้แผ่นที่นอนลม ถ้าสายไฟชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือแช่อยู่ในน้ำ
2. ไม่ควรนั่งหรือยืนบนแผ่นที่นอนลม
3. ไม่ควรเคลื่อนย้ายแผ่นที่นอนลม โดยวิธีดึงหรือลากสายไฟ
4. ไม่ควรแกว่ง ดึง หรือบิดสายไฟของแผ่นที่นอนลมและเครื่องปั๊มลมไฟฟ้า
5. ไม่ควรวางแผ่นที่นอนลมใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ทำให้เกิดความร้อนและไม่ควรให้สายไฟวางอยู่บนพื้นที่ยร้อน
6. ไม่ควรให้ของแหลมคมทิ่มเข้าไปในแผ่นที่นอนลม
7. อย่าใช้อุปกรณ์ในขณะที่แผ่นที่นอนลมย่นหรือถูกพับอยู่
8. อย่าถอดปลั๊กโดยใช้วิธีดึงสายไฟ
9. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังการใช้งาน
10. ตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสายไฟ ว่ามีความเสียหายหรือฉีกขาดหรือไม่ ถ้ามีความเสียหายให้

### การทำความสะอาด

1. ก่อนทำความสะอาด ให้กดปุ่มเปิด-ปิดกระแสไฟฟ้า(ON-OFF) ไปที่ “OFF” แล้วถอดปลั๊กไฟออก

2. ไม่ควรให้เครื่องปั๊มลมไฟฟ้า แช่อยู่ในน้ำ
3. ทำความสะอาดส่วนเฉพาะด้านนอกของเครื่องปั๊มลมไฟฟ้าเท่านั้น
4. ส่วนที่เป็นพลาสติกถ้ามีคราบสกปรกใดๆ สามารถทำความสะอาดได้โดยใช้สบู่อ่อนและน้ำหรือผ้าแห้งหรือผ้าหมาดๆ เช็ดหลังจากถอดปลั๊กแล้ว ผึ่งลมให้แห้ง
5. ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ กัดกร่อนทำความสะอาดส่วนที่เป็นพลาสติก

## การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

1. ปั๊มลมไม่ทำงาน
  - ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟ เสียบกับเต้าเสียบแน่นพอดี จากนั้นเปิดสวิทช์เปิด/ปิด อีกครั้งหนึ่ง
  - หากยังเกิดปัญหาอยู่ให้ ติดต่อศูนย์บริการ
2. แผ่นที่นอนลมพองตัวไม่เต็มที่
  - ปรับเพิ่มความดันในชั้นแรกก่อน
  - ตรวจสอบว่า สายลมซิลิโคน ต่อกับแผ่นที่นอนลมอย่างถูกต้อง สายมีการบิดตัวหรือรั่วหรือไม่ หากมีการรั่วให้ติดต่อศูนย์บริการ

### การเก็บรักษา

1. เก็บในที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวกและพ้นจากแสงแดด
2. เก็บรักษาโดยไม่พับหรือวางของหนักทับ

**ผู้นำเข้า** บริษัท เบลแมกส์ไทย จำกัด

เลขที่ 15/117 หมู่ 3 ซอยเก้ากิโล23 ถนนเก้ากิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ 098-2805777 หรือศูนย์บริการหลังการขาย 081-633-9942

เบอร์โทรสาร 038-314-118

**ผู้ผลิต** บริษัท อีอีซีแคร์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 3-1 ถนนหมื่นฉนวน เมืองฉะเชิงเทรา โทเป เสียน ใต้หวัน